

# Kom snabbt igång med Albus

## Checklista för att komma igång med Albus


### Första gången du använder Albus

1. Länk till Albus användarportal samt dina användaruppgifter skickade till dig per mail
  2. Klicka på länken i mailet och logga in med ditt användarnamn och lösenord\*
- Du blir nu inloggad i Albus användarportal där du kan se och administrera dina klienter.

\*Inloggning via Bank-Id håller på att implementeras

### Lägg till en ny Klient

1. Logga in i Albus användarportal
2. För att lägga till en ny klient klickar du på knappen "Lägg till klient" och följer guidens 3 steg.
3. **Steg1:** här fyller du i klientens personuppgifter, telefonnummer för resultatdelning, vilka resultat som ska delas via sms, gränsvärde samt om promillevärdet ska visas i klientappen eller ej.
4. **Steg 2:** här har du möjlighet att skicka ett välkomst-SMS till klienten, du kan välja att bara gå vidare utan att skicka ett sms
5. **Steg 3:** i detta steg kan du lägga upp ett schema genom att klicka Nytt schema och redigera det förvalda schemat. Har ni inte kommit överens om schemalagda tider kan du gå vidare och lägga upp ett schema i ett senare skede.
6. Efter steg 3 har du möjlighet att via systemet beställa alkomätare genom att klicka på Beställ mätare. Har du mätare på plats går du vidare till Klientöversikten.
7. Klienten är nu upplagd i systemet
8. Behöver du hjälp att lägga upp ett schema är du välkommen att ringa vår support på Tel. [08-230222](tel:08-230222) eller maila till: [info@albus.care](mailto:info@albus.care) – ange aktuellt Albus-idsamt de tider du vill schemalägga

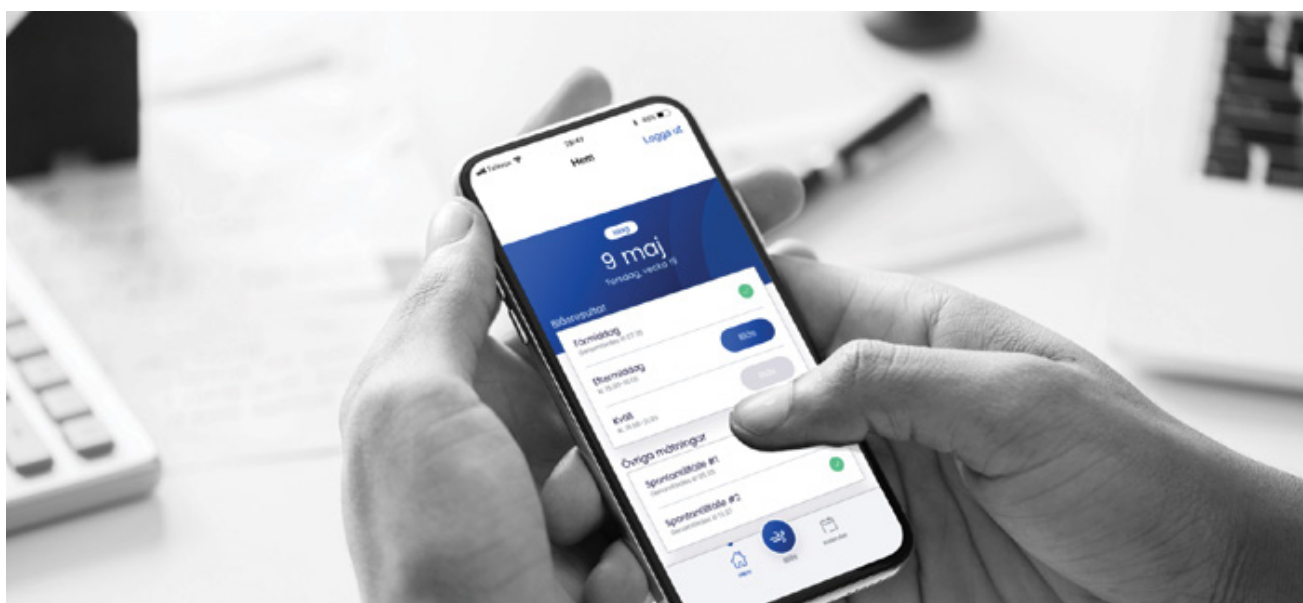



## Starta mätningarna med klienten

1. Hjälp klienten att installera och logga in i appen med hjälp av instruktionerna i alkomätarens förpackning eller via direktlänk; <https://www.albuscare.com/start>
2. För att logga in ska klienten ange sitt telefonnummer, därefter ange den 6-siffriga engångskod som skickas per sms till klienten.
3. För att appen ska fungera korrekt måste klienten acceptera och godkänna den föreslagna åtkomstbegäran samt slå på bluetooth-enheten. För Android gäller även att Plats/Platstjänser är påslagen i telefonen.
4. Montera munstycket på alkomätaren (munstycken finns i förpackningen)
5. Öppna Albus-appen på klientens telefon
6. Tryck på den blå "Blås"-knappen längst ner i mitten
7. Nästa steg är att ange sitt mående genom att föra markören till den plats på linjen som bäst motsvarar måendet i stunden, klicka sedan på fortsätt
8. Starta alkomätaren (silverknappen under munstycket), appen ansluter nu med alkomätaren automatiskt, klienten ska alltså INTE parkoppla mätaren med appen.
9. Följ nu instruktionerna i appen för att utföra ett utandningstest.
10. Låt klienten genomföra ett utandningstest samtidigt som han/hon håller upp mobilen framför ansiktet så att kameran kan ta ett foto av ansiktet
11. Vänta på resultatet och visa upp hur det ser ut i klientens telefon och i ditt system (användarportalen)
12. Klienten ska sedan blåsa på era överenskomna schemalagda tillfällen. Klienten ser dagens tillfällen i sin app plus att det skickas påminnelser per sms om att blåsa under aktivt tillfälle.

## Övervaka mätningarna

1. Om klienten avviker från schemat eller har mer alkohol i utandningsluften än det satta gränsvärdet, visas en markering med gul respektive röd signal vid den aktuella klienten i din klientöversikt samt i resultatöversikten. Om det däremot skapas en grön signal, genomförs blåsningarna enligt plan.
2. Du kan när som helst logga in i användarportalen och kontrollera resultat samt foton från olika mätningstillfällen.

## Beställa alkoholmätare

Lägg din beställning direkt i användarportalen eller maila till [info@albuscare.com](mailto:info@albuscare.com).  
Ange ditt namn, arbetsplats, adress samt antal mätare