



ALBUS

Instruktionsmanual **iOS + Android**




www.albuscare.com



Albus är **CE-märkt och godkänd** i enlighet med
Läkemedelsverkets föreskrifter

Använd din alkomätare

1. **Sätt på** ett munstycke på alkomätaren.
Starta alkomätaren på **silverknappen** under munstycket. (Se till att Bluetooth/Blåtand är ingång på telefonen)
2. Längst ner i appnavigationen finns en blå knapp som heter **"Blås"**. Klicka på denna och tillåt allt som appen frågar om
3. Om inget händer klicka på **"Blås"** igen
4. Nu kommer själva blåstestet. Gradera först mående; för att göra det peka på skalan under emojifigurerna och tryck **Fortsätt**

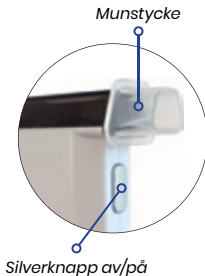

Använd din alkomätare


5. Alkomätaren värmer upp, det tar ca 10 sekunder. Sedan kan man blåsa
Blåsresultatet kommer efter att blåsningen genomförts
6. Dagens resultat sparas tillfälligt på förstasidan och hamnar sedan i
“Kalender”
7. Albus går att stängas ned som en vanlig app
8. **Albus** kan när som helst startas från hemschärmen eller bland andra appar.



Gradera mående



Mätaren ansluter

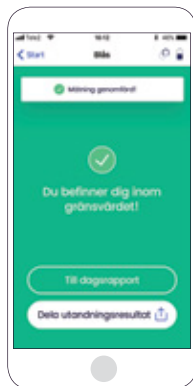

Mätningen genomförd

Checklista – Klient

1. Du behöver ett Apple-id eller Google-konto inlagt på din telefon
2. Ladda ned Albus-appen som passar din telefon (iPhone/Android)
3. Se till att blåtanden är påslagen på din telefon
4. Montera munstycket och slå på alkomätaren på silverknappen
Alkomätaren ska lysa blått, annars behöver den laddas.
(Se "Ljusaktiviteter")
5. Öppna appen. Första gången kommer du behöva ange ditt mobilnummer. Du får en kod via SMS som du ska mata in
6. Klicka på "Blås"-knappen när du är inloggad
7. Tillåt alla förfrågningar om rättigheter
8. Gradera ditt mående genom att klicka på skalan under figurerna och trycker på "Fortsätt"
9. Alkomätaren värmer upp det tar 10-14 sekunde
10. Genomför blåstestet genom att blåsa i munstycket och titta in i kameran, Albus tar en bild på dig som blåser. När du hör ett klick i alkomätaren har du blåst klart
11. Blåsresultatet presenteras på skärmen
12. Stäng ned appen som en vanlig app
13. Du kan när som helst köra igång appen från hemskärmen eller bland andra appar.

Daglig användning

- Se till att alkomätaren är laddad med den medföljande kabeln som ansluts till dator eller mobilladdare. En vanlig laddning tar ungefär 2-3 timmar och kan hålla i lera veckor beroende hur mycket den används
- Skölj, rengör eller byt munstycket vid behov
- Om Blåtanden (Bluetooth) stängs av behöver du slå på Blåtanden igen, Albus gör inte detta åt dig
- Kör igång appen Albus från hemskärmen eller bland andra appar
- Håll dig inloggad så slipper behövs ingen verifiering/inloggning igen. Standard är 30 dagar
- Du får dagliga SMS-påminnelser när tiden för blåsning håller på ta slut.

Längre tids användning

Om alkomätaren används dagligen längre än 6-12 månader behöver kalibreringen kontrolleras. Kontakta Support för detta.

Försiktighetsåtgärder

- Blås inte rök, mat eller vätskor i din alkomätare, det kan skada sensorn
- Om produkten används dagligen i längre än 6-12 månader bör alkomätaren lämnas in för kalibrering. Kontakta Support för detta
- Utför inte blåstestet i områden med stark vind eller rök
- Alkomätaren är utformad för användning i temperaturer 0-40 °C
- Undvik testning i närvaro av några ämnen som innehåller metylalkohol, isopropylalkohol eller aceton. Dessa ämnen kan störa testresultaten

Supportinformation

Kontakta vår support om ni behöver hjälp.

Supporten är öppen vardagar mellan kl 8.00-16.00

Tel: 08-23 02 22

Mail: info@albus.care



CRAS är **CE-märkt och godkänd** i enlighet med
Läkemedelsverkets föreskrifter