



ALBUS

Instruktionsmanual
iOS + Android




www.albuscare.com



Alkomätare är **CE-märkt och godkänd** i enlighet med
Läkemedelsverkets föreskrifter








Använd din alkomätare

1. **Sätt på** ett munstycke på alkomätaren.
Starta alkomätaren på **silverknappen** vid munstycket.
(Se till att Bluetooth/Blåtand är ingång på telefonen)
2. I appnavigationen finns en knapp som heter "**Blås**".
Klicka på denna och tillåt allt som appen frågar om.
3. Om inget händer klicka på "**Blås**" igen.
4. Nu kommer själva blåstestet.

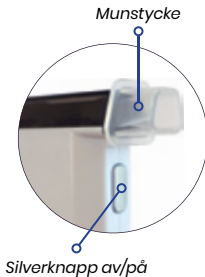

Använd din alkomätare

5. Alkomätaren värmer upp, det tar ca 10 sekunder. Sedan kan man blåsa och blåsresultatet kommer efter att blåsningen genomförts
6. Blåsresultat sparas tillfälligt på förstasidan och hamnar sedan i Kalendern
7. Albus-appen går att stänga ned som en vanlig app.
8. Albus-appen kan startas från hemskärmen som en vanlig app.

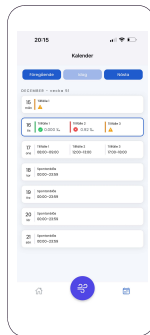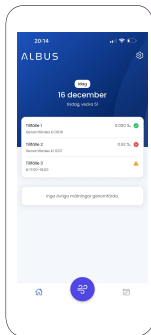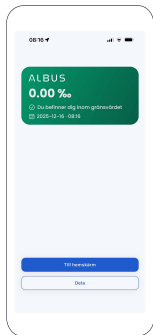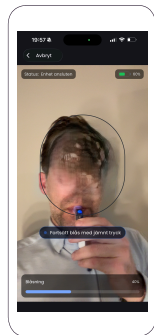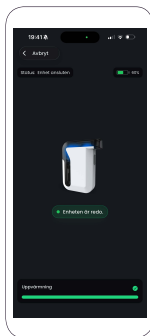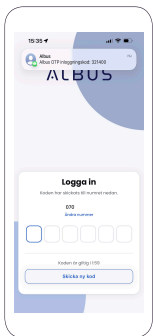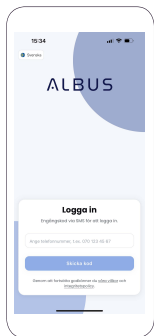

Checklista – Klient

1. Du behöver ett Apple-id eller Google-konto inlagt på din telefon.
2. Ladda ned Albus-appen som passar din telefon (iPhone/Android).
3. Montera munstycket och slå på alkomätaren på silverknappen
 - a. Alkomätaren ska lysa blått, annars behöver den laddas.
4. Se till att blåttand (Bluetooth) är påslagen på din telefon.
5. Öppna Albus-appen.
 - a. För att logga in, kommer du behöva ange ditt mobilnummer.
 - b. Du får drefter en kod via SMS som du ska mata in.
6. Tillåt alla förfrågningar om rättigheter som Albus-appen efterfrågar.
7. Klicka på "Blås"-knappen när du är inloggad.
8. Alkomätaren värmer upp det tar 10-14 sekunder.
9. Genomför blåstestet genom att blåsa i munstycket och titta in i kameran.
 - a. När du hör ett klick i alkomätaren har du blåst klart.
 - b. Albus-appen tar en bild på dig som blåser.
10. Blåsresultat presenteras på skärmen och sparas i kalendern.
11. Stäng ned Albus-appen som en vanlig app.
12. Du kan när som helst köra igång Albus-appen för nya blåstest.

Daglig användning

- Skölj, rengör eller byt munstycket vid behov.
- Se till att alkomätaren alltid är laddad.
 - Använd den medföljande kabeln som ansluts till dator / mobiladdare.
 - En vanlig laddning tar ungefär 2-3 timmar.
 - En laddning kan hålla i flera veckor beroende hur den används.
- Om Blåtanden (Bluetooth) stängs av behöver du slå på Blåtanden igen.
 - Albus-appen startar inte Bluetooth automatiskt åt dig.
- Starta Albus-appen från hemskärmen eller bland dina andra appar
- Håll dig inloggad så behövs ingen verifiering/inloggning igen.
 - Standard är 30 dagar
- Du får dagliga SMS-påminnelser när tiden för blåsning håller på ta slut.

Längre tids användning

Om alkomätaren används dagligen längre än 6-12 månader behöver kalibreringen kontrolleras. Kontakta Support för detta.

Försiktighetsåtgärder

- Blås inte rök, mat eller vätskor i din alkomätare, det kan skada sensorn.
- Om produkten används dagligen i längre än 6-12 månader bör alkomätaren lämnas in för kalibrering. Kontakta Support för detta.
- Utför inte blåstestet i områden med stark vind eller rök.
- Alkomätaren är utformad för användning i temperaturer 0-40 °C.
- Undvik testning i närvaro av några ämnen som innehåller metylalkohol, isopropylalkohol eller aceton. Dessa ämnen kan störa testresultaten.

Supportinformation

Kontakta vår support om ni behöver hjälp.

Supporten är öppen vardagar kl 08.00-16.00

Tel: 010-3037470

Mail: info@albuscare.com



Alkomätare är **CE-märkt och godkänd** i enlighet med
Läkemedelsverkets föreskrifter