

# Kom snabbt igång med Albus


## Checklista för att komma igång med Albus

### Första gången du använder Albus

1. Länk till Albus användarportal samt dina användaruppgifter skickade till dig per mail.
2. Klicka på länken i mailet och logga in med ditt användarnamn och lösenord / BankID.
3. Du blir nu inloggad i Albus användarportal där du kan se och administrera dina klienter.

### Lägg till en ny Klient

1. Logga in i Albus användarportal
2. För att lägga till en ny klient klickar du på **Aktivera ny klient** och följer guidens 3 steg.
3. Steg1: här fyller du i klientens personuppgifter, telefonnummer för resultatdelning, vilka resultat som ska delas via sms, vilka gränsvärden samt om promillevärdet ska visas i Albus klientapp eller ej.
4. Steg2: här har du möjlighet att skicka ett välkomst-SMS till klienten, du kan fortsätta utan att skicka ett SMS.
5. Steg3: här kan du lägga upp ett schema genom att redigera det förvalda schemat. Har ni inte kommit överens om schemalagda tider kan du gå vidare och lägga upp ett schema i senare skede.
6. Efter steg 3 har du möjlighet att via systemet beställa alkomätare genom att klicka på **Beställ mätare**. Har du mätare på plats går du vidare till Klientöversikten.
7. Klienten är nu upplagd i systemet.
8. Behöver du hjälp att lägga upp ett schema är du välkommen att ringa vår support vardagar kl 08.00-16.00 på Tel. [010-3037470](tel:010-3037470) eller maila till: [info@albuscare.com](mailto:info@albuscare.com) – ange Albus-id samt tider du vill schemalägga.

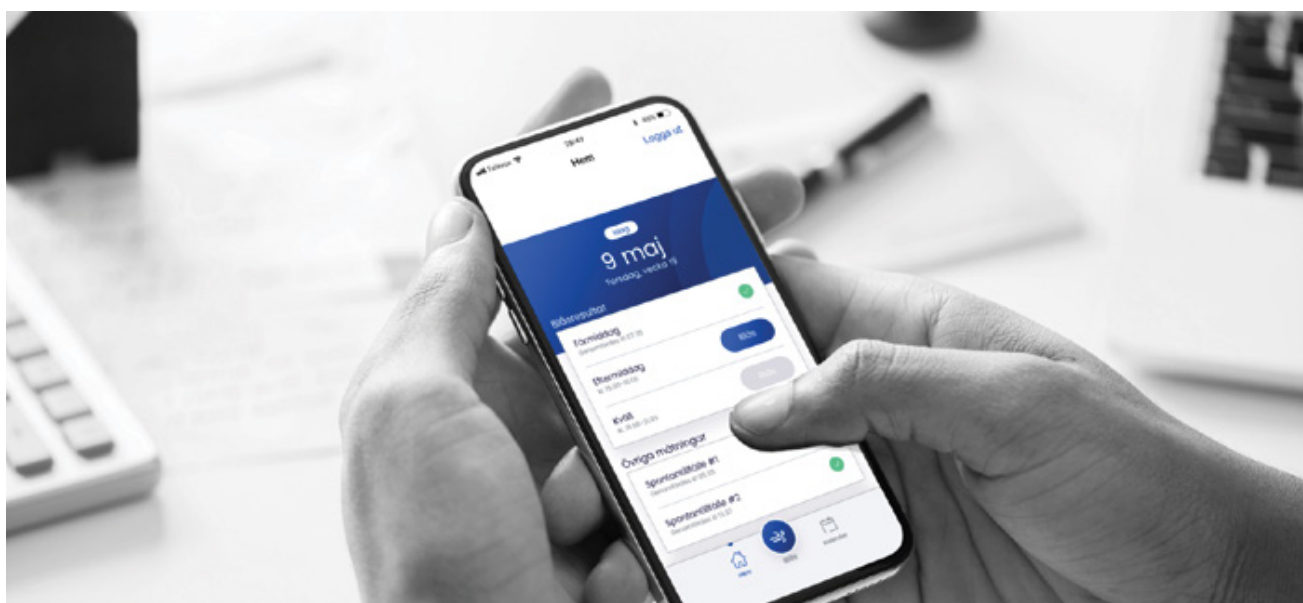



## Starta mätningarna med klienten

1. Hjälp klienten att installera och logga in i appen med hjälp av instruktionerna i alkomätarens förpackning eller via direktlänk; <https://www.albuscare.com/start>
2. För att logga in ska klienten ange sitt telefonnummer, därefter ange den 6-siffriga engångskod som skickas per sms till klienten.
3. För att appen ska fungera korrekt måste klienten acceptera och godkänna den föreslagna åtkomstbegäran samt slå på bluetooth-enheten. För Android gäller även att Plats/Platstjänster är påslagna i telefonen.
4. Montera munstycket på alkomätaren (munstycket finns i förpackningen)
5. Öppna Albus-appen på klientens telefon
6. Tryck på den blå "Blås"-knappen längst ner i mitten
7. Starta alkomätaren (silverknappen under munstycket), appen ansluter nu med alkomätaren automatiskt, klienten ska alltså INTE parkoppla mätaren med appen.
8. Följ nu instruktionerna i appen för att utföra ett utandningstest.
9. Låt klienten genomföra ett utandningstest samtidigt som han/hon håller upp mobilen framför ansiktet så att kameran kan ta ett foto av ansiktet
10. Vänta på resultatet och visa upp hur det ser ut i klientens telefon och i ditt system (användarportalen)
11. Klienten ska sedan blåsa på era överenskomna schemalagda tillfällen.
12. Klienten ser tillfällen i sin app plus att det skickas påminnelser per sms om att blåsa under aktivt tillfälle.

## Övervaka mätningarna

1. Om klienten avviker från schemat eller har mer alkohol i utandningsluften än det satta gränsvärdet, visas en markering med gul respektive röd signal vid den aktuella klienten i din klientöversikt samt i resultatöversikten. Om det däremot skapas en grön signal, genomförs blåsningarna enligt plan.
2. Du kan när som helst logga in i användarportalen och kontrollera resultat samt foton från mätningstillfällen.

## Beställa alkoholmätare

Lägg beställning direkt i användarportalen eller maila [info@albuscare.com](mailto:info@albuscare.com). Ange ditt namn, arbetsplats, adress samt antal mätare.