



# ALBUS

[www.albuscare.com](http://www.albuscare.com)



David Blomquist

VD


[David.blomquist@albuscare.com](mailto:David.blomquist@albuscare.com)



Ulrika Holmquist


KAM / Kundsupport

[Ulrika.holmqvist@albuscare.com](mailto:Ulrika.holmqvist@albuscare.com)

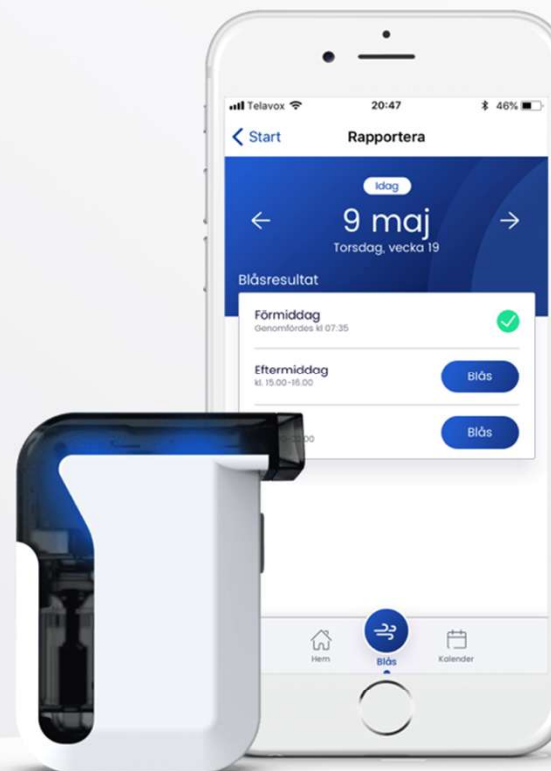


# Så fungerar Albus Pro


Kontinuitet, kontroll och trygghet genom dagliga nykterhetstester. Schemalagda eller spontana, på distans och i realtid.

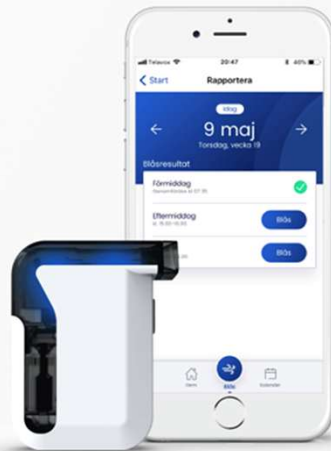

Alkomätare & app  
för klienter


Webbportal för  
behandlare

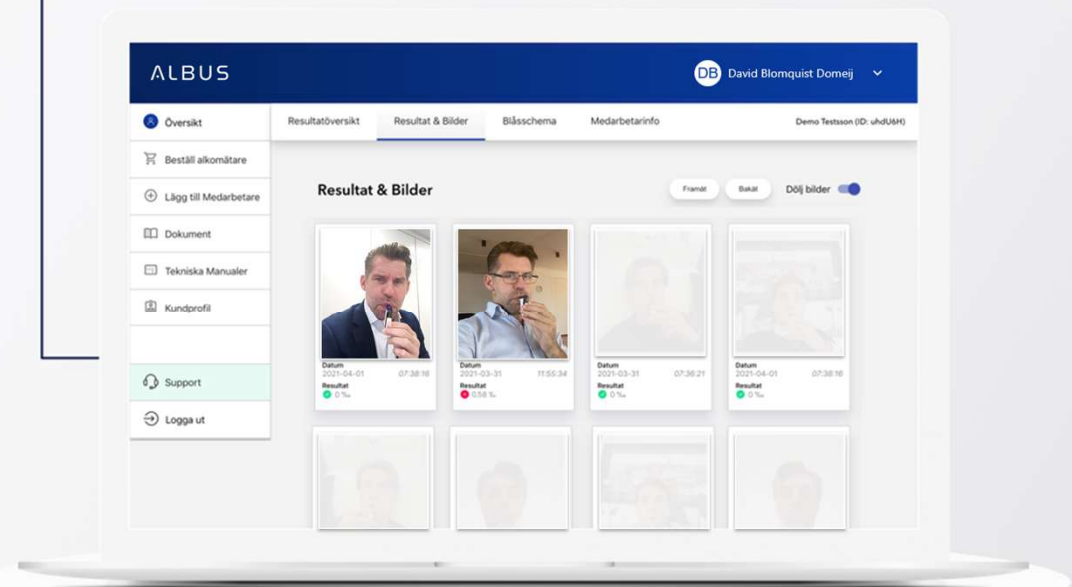

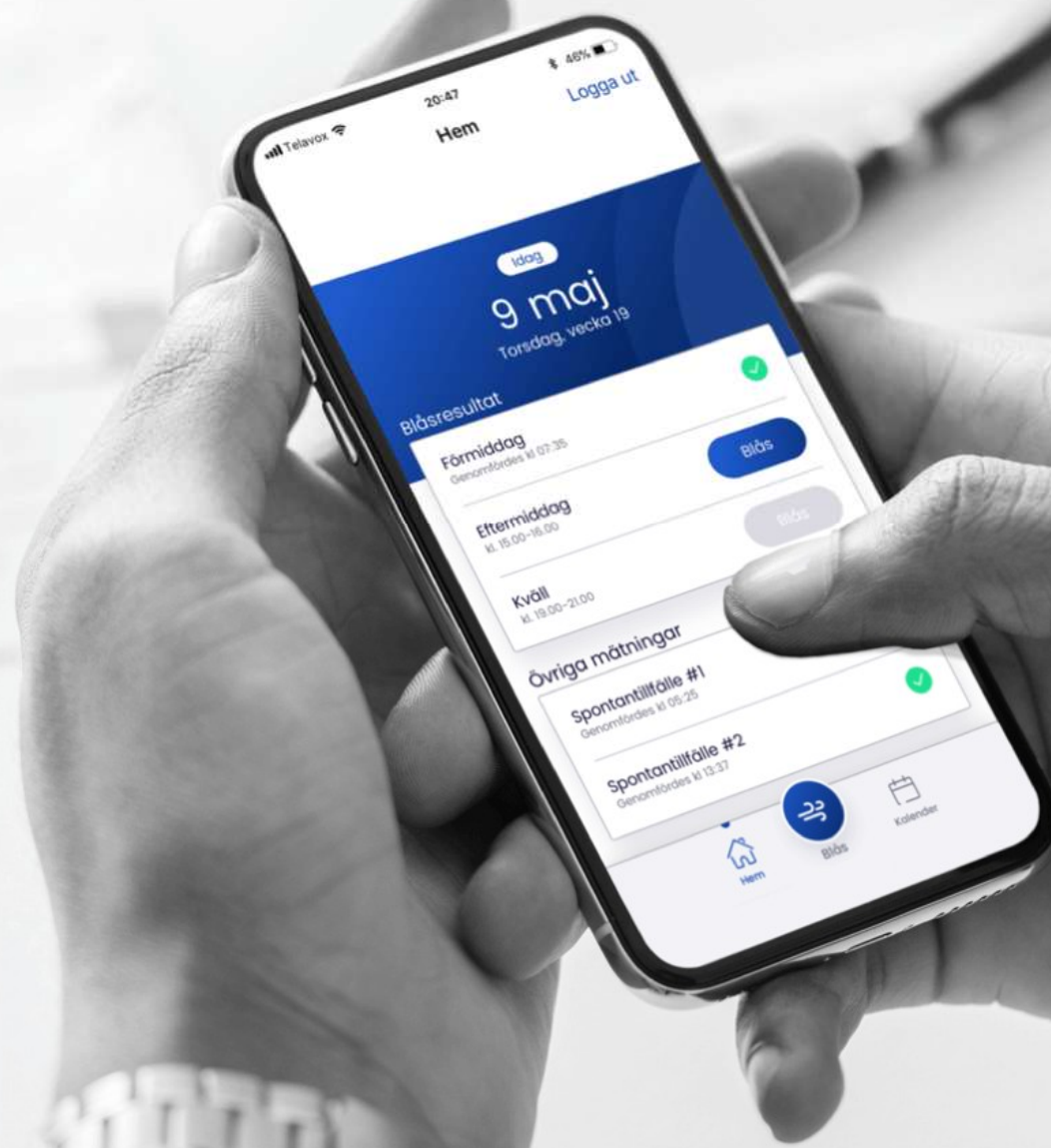


# Klient-appen

- Klientens telefon behöver ha bluetooth påslaget
- Mätaren tar ca 12 sekunder att värma upp
- Utandningen sker i jämn medelintensiv takt i ca 5 sekunder
- Mätaren knäpper till när blåset är klart

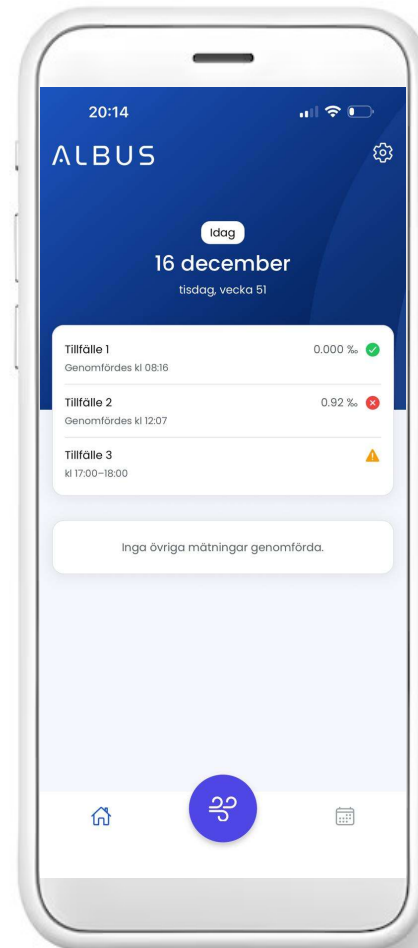

# Nyckel-funktioner

- Överföring av testresultat i realtid med promillehalt, tidstämpel, selfie och signal
- Automatisk prioritering av klienter utifrån realtidsdata
- Automatisk delning av avvikelser via SMS

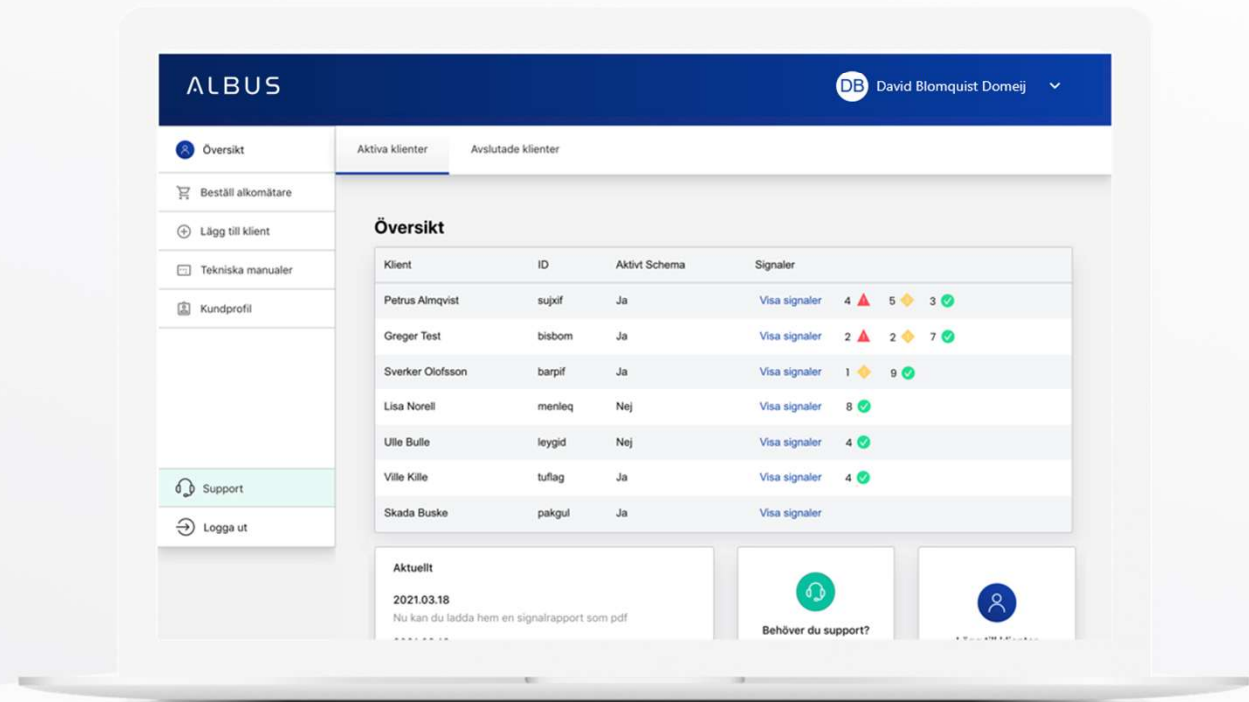

# Centrala fördelar

## Behandlare

- Får en kontinuerlig inblick och kan agera tidigare vid avvikelser
- Kan arbeta mer resurseffektivt
- Kan ge stöd på distans

## Klienter

- Kan utföra tester på distans, utan att någon ser på
- Behöver potentiellt göra färre urin- och blodprover
- Får ökad trygghet och kan dela resultat för att återbygga förtroenden


## Arbetsgivare/HR





- Kan säkerställa nykterhet på arbetstid, varje dag
- Får potentiellt färre utgifter för urin- och blodprover
- Testerna kan utföras varifrån som helst, utan förlorad arbetstid





# ALBUS



www.albuscare.com



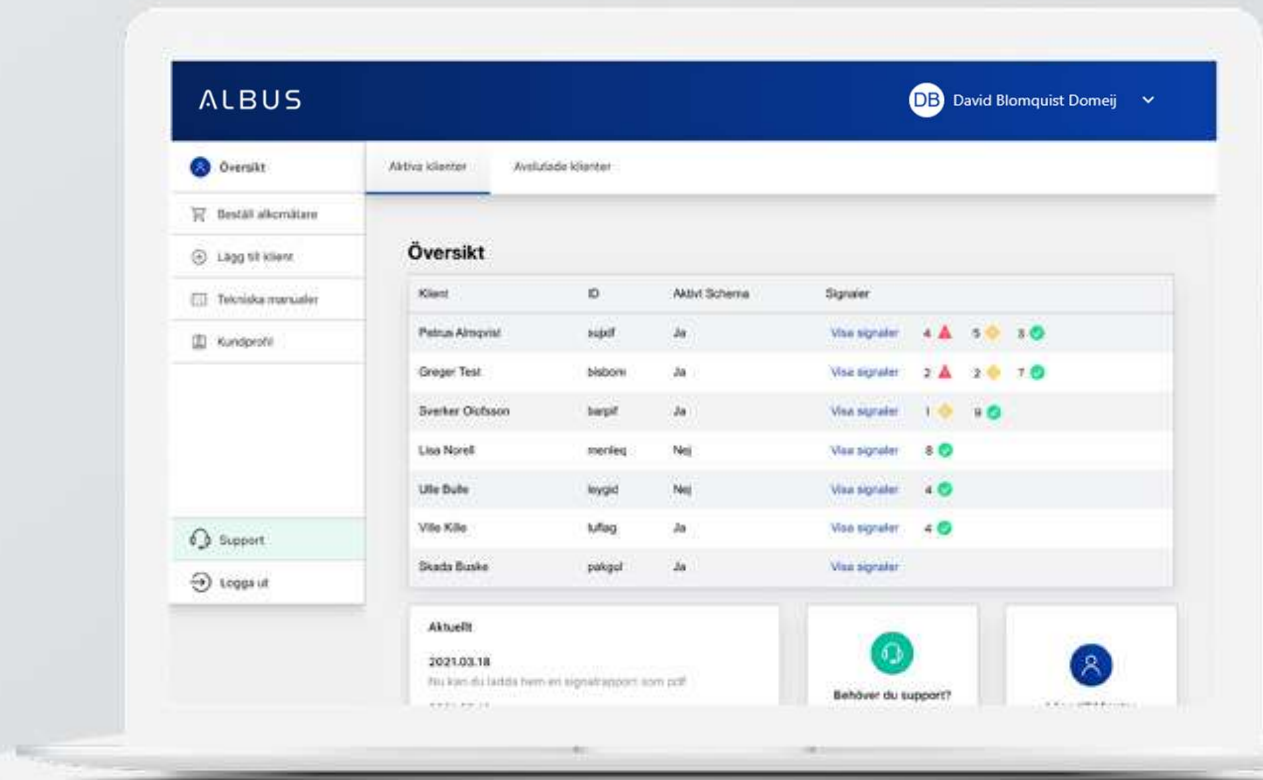


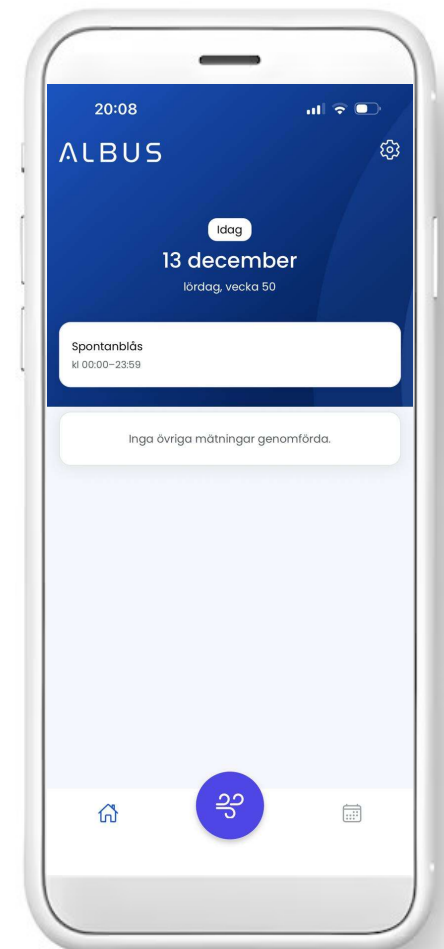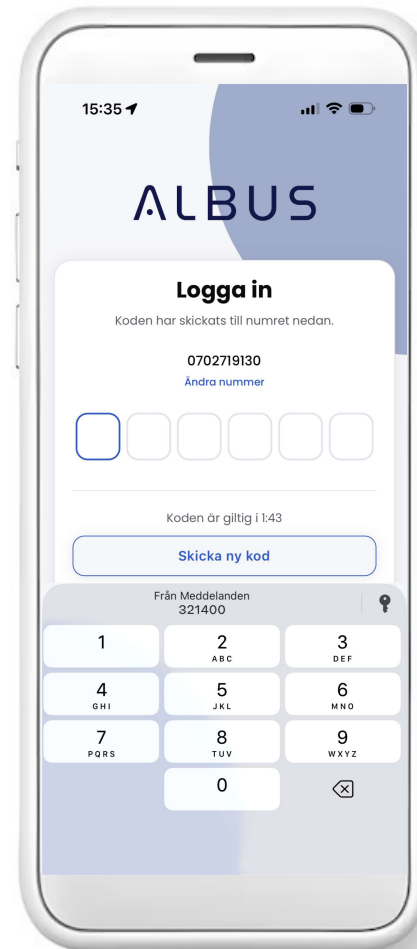
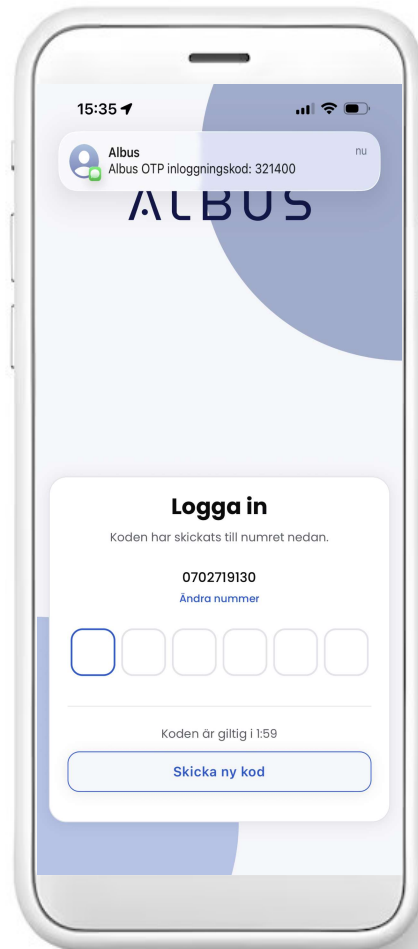
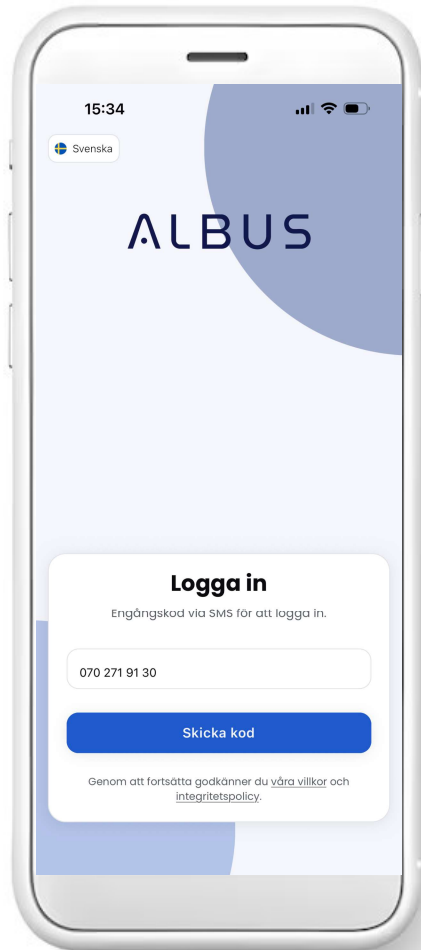


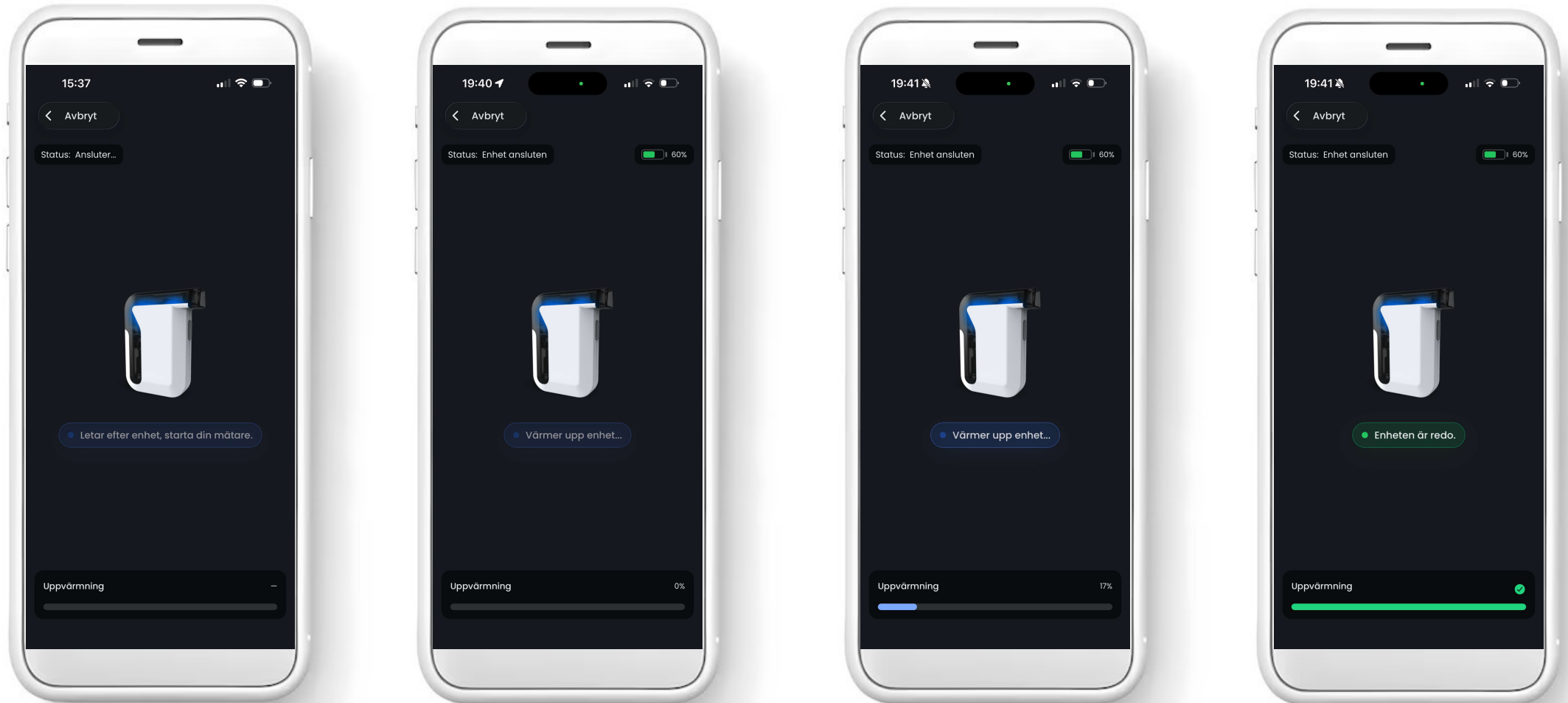

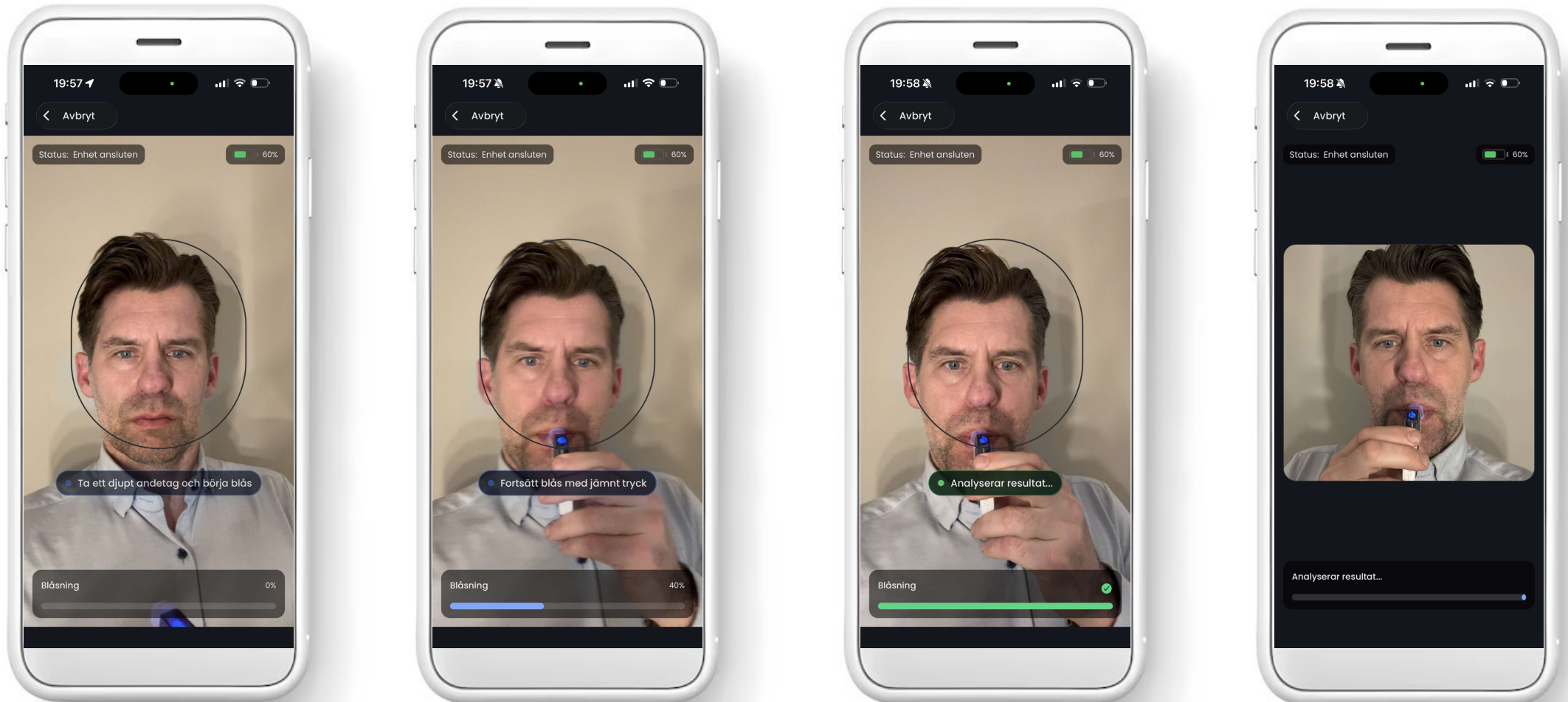

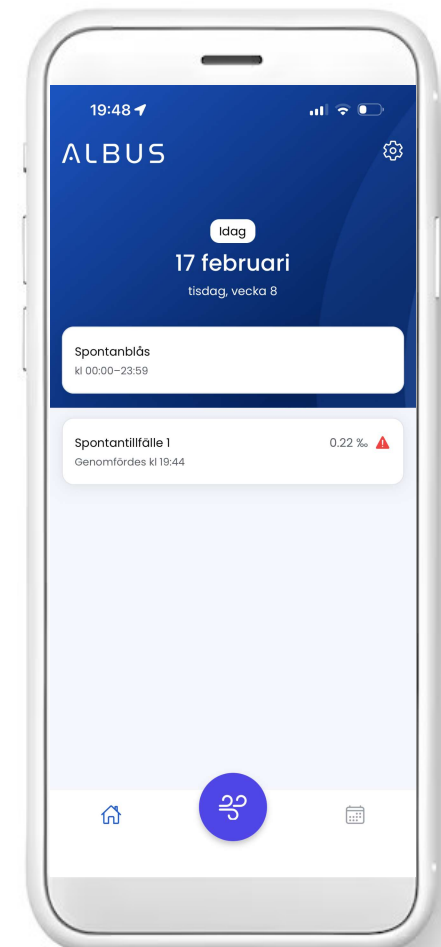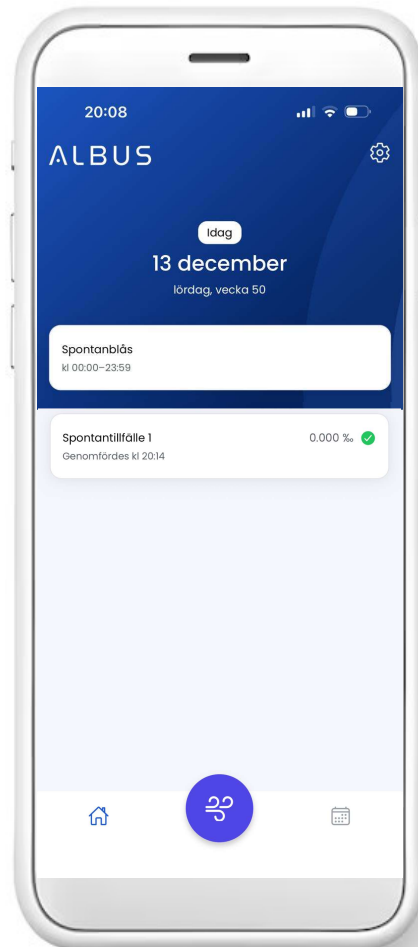

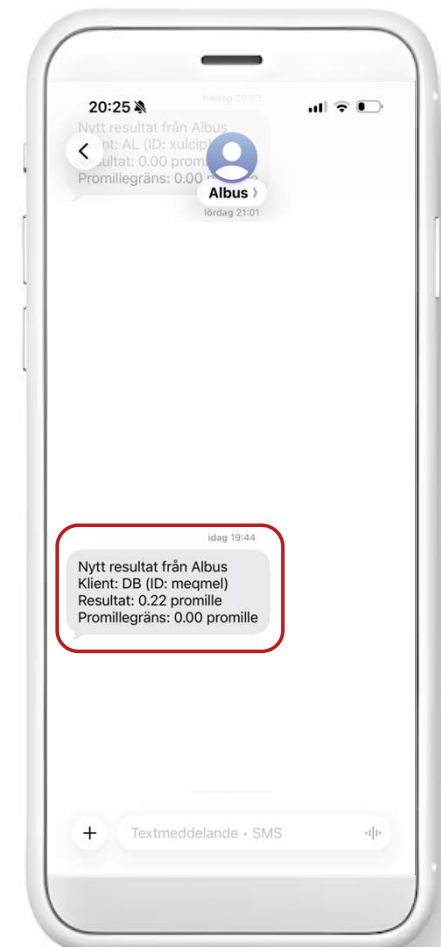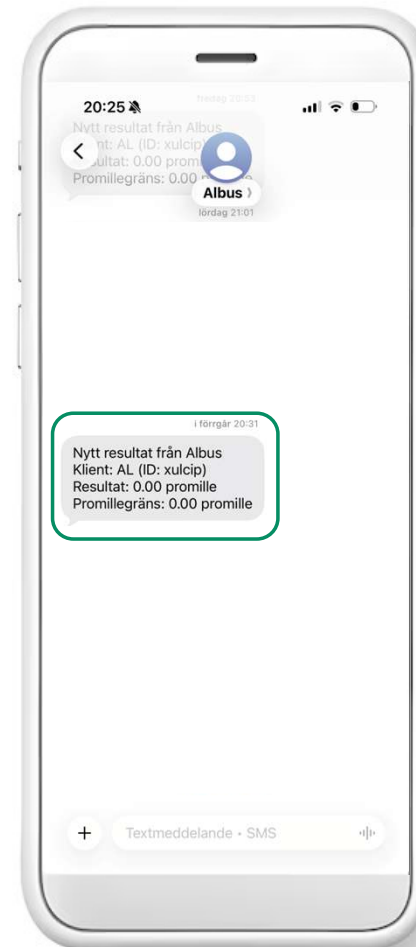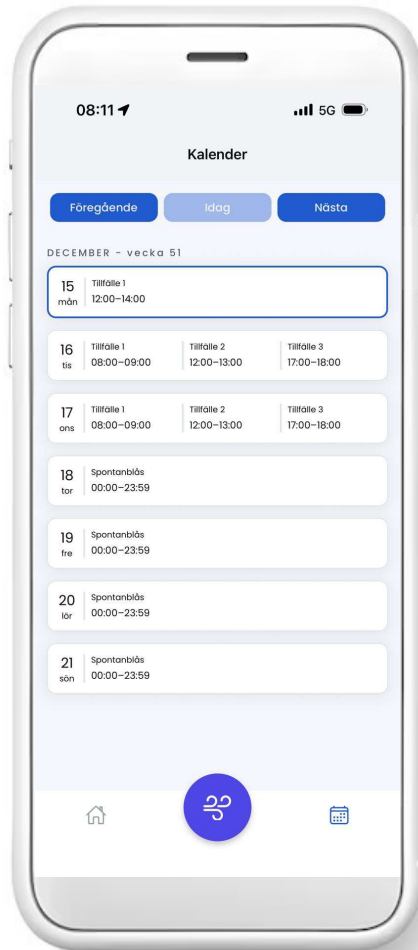

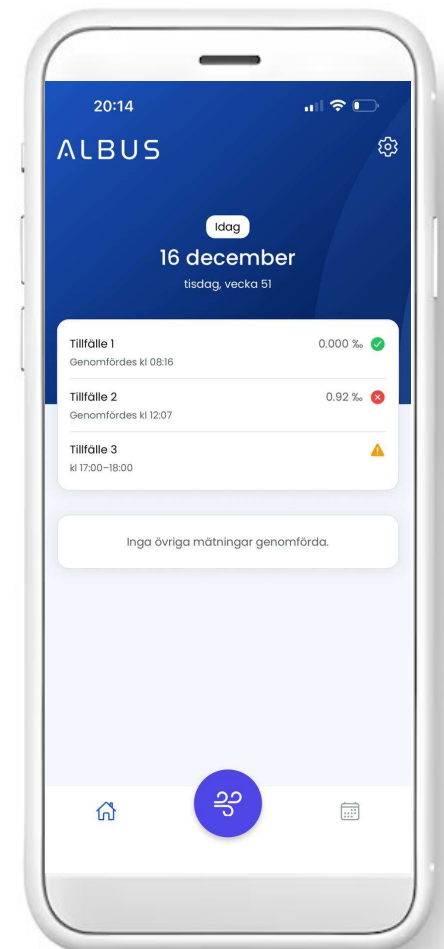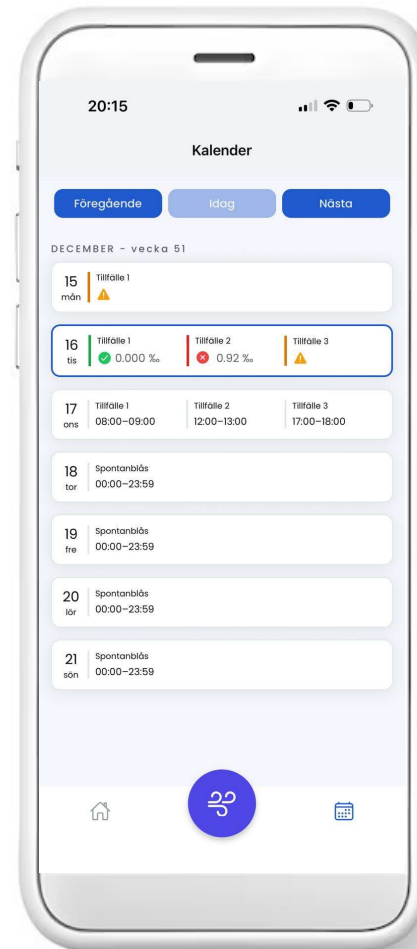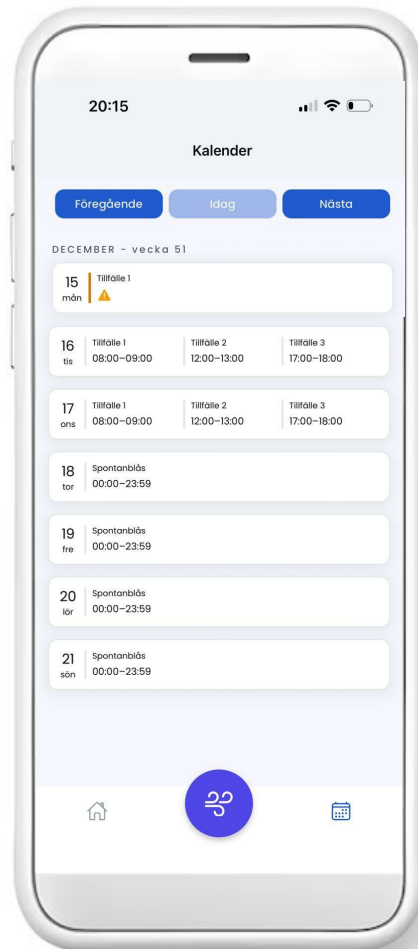

 Klienter Aktivera ny klient Beställ alkomätare Kunskapsbank Kundprofil Support Logga ut

## Välkommen till Albus

Kom enkelt igång genom att aktivera nya klienter och beställa alkomätare via menyn till vänster.

Om du skulle behöva hjälp är du alltid välkommen att kontakta vår support.



- Klienter
- Aktivera ny klient
- Beställ alkometare
- Kunskapsbank
- Kundprofil
- Support
- Logga ut

Aktiva klienter    Avslutade klienter

Aktiva klienter

| Namn            | Albus-ID | Eget ID | Aktivt Schema | Olästa        |     |
|-----------------|----------|---------|---------------|---------------|-----|
| David Blomquist | meqmel   | 770612  | Nej           | 12 ⚠ 2 ⚠ 13 ✓ | 🔍 ✕ |
| Anna Lundgren   | xulcip   | 800613  | Ja            | 7 ⚠ 106 ✓     | 🔍 ✕ |

Summering: 35 3 30

David Blomquist (MEQMEL)

Från datum

Till datum

Markera allt som läst

Ladda ner resultatrapport

Antal resultat: 68

Framåt

Bakåt

| Signal | Resultat | Beskrivning                     | Tidpunkt         | Promillegräns | Status |
|--------|----------|---------------------------------|------------------|---------------|--------|
|        | 0 ‰      | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-11-27 12:42 | 0.00‰         |        |
|        | 1.92 ‰   | Överskridet gränsvärde          | 2025-10-30 18:42 | 0.00‰         |        |
|        | 0.63 ‰   | Överskridet gränsvärde          | 2025-10-24 18:09 | 0.00‰         |        |
|        | 0 ‰      | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-10-07 10:37 | 0.00‰         |        |
|        | 0.62 ‰   | Överskridet gränsvärde          | 2025-10-03 13:53 | 0.00‰         |        |
|        | 2.69 ‰   | Överskridet gränsvärde          | 2025-10-03 13:40 | 0.00‰         |        |
|        | 0 ‰      | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-10-03 13:39 | 0.00‰         |        |
|        |          | Missat utandningstest           | 2025-09-30 23:01 | 0.00‰         |        |
|        | 0 ‰      | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-09-29 22:12 | 0.00‰         |        |
|        | 0 ‰      | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-09-29 22:04 | 0.00‰         |        |
|        | 3.39 ‰   | Överskridet gränsvärde          | 2025-09-29 21:18 | 0.00‰         |        |
|        | 0 ‰      | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-09-29 21:16 | 0.00‰         |        |
|        | 4.95 ‰   | Överskridet gränsvärde          | 2025-09-29 21:02 | 0.00‰         |        |



- Aktivera ny klient
- Beställ alkometare
- Kunskapsbank
- Kundprofil

- Support
- Logga ut

Resultat & bilder

2025

David Blomquist (MEQMEL)

Framåt Bakåt Dölj bilder



Datum  
2025-11-27 12:42:47  
Resultat  
0 ‰



Datum  
2025-10-30 18:42:58  
Resultat  
1.92 ‰



Datum  
2025-10-24 17:09:06  
Resultat  
0.63 ‰



Datum  
2025-10-07 09:37:11  
Resultat  
0 ‰



- Klienter
- Aktivera ny klient
- Beställ alkomatäre
- Kunskapsbank
- Kundprofil
- Support
- Logga ut

Blåsschema

+ Skapa nytt schema

David Blomquist (MEQMEL)

Aktiva scheman Kommande scheman Inaktiva scheman

Helg agenda

Inaktiveras imorgon

Startdatum: 2025-12-06 Gäller till: 2025-12-07

|             |                    |                  |
|-------------|--------------------|------------------|
| Tillfälle 1 | Tid: 08:00 - 09:00 | Dagar: Lör - Sön |
| Tillfälle 2 | Tid: 12:00 - 13:00 | Dagar: Lör - Sön |
| Tillfälle 3 | Tid: 22:00 - 23:00 | Dagar: Lör - Sön |

Redigera Inaktivera



- Klienter
- Aktivera ny klient
- Beställ alkometare
- Kunskapsbank
- Kundprofil
- Support
- Logga ut

Resultatöversikt   Resultat & Bilder   Blåsschema   Klientinställningar

Klientinställningar

David Blomquist (MEQMEL)

FÖRNAMN \*

David

EFTERNAMN \*

Blomquist

KLIENTENS TELEFONNUMMER \*

0702719130

ALBUS-ID ⓘ

meqmel

EGET ID

770612

TELEFONNUMMER FÖR RESULTATDELNING ⓘ

0702719130 X

Vid flera telefonnummer trycker du enter efter varje

DELA RESULTAT VIA SMS VID: ⓘ

Missade och över promillegräns

PROMILLEGRÄNS ⓘ

0.00

TIDSSKILLNAD ⓘ

+0 h

VISA MÄTRESULTAT FÖR KLIENTEN?

Ja, visa promille efter blås

Nej, visa inget promille efter blås

Ja, visa promille efter blås

Spara ändringar

Skicka nytt välkomst-sms





## ALBUS RESULTATRAPPORT

Albus-ID: MEQMEL

Antal resultat: 68

Summering: 35  3  30 

| Signal                                                                              | Resultat(‰) | Beskrivning                     | Datum      | Tidpunkt | Promillegräns(‰) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------|----------|------------------|
|    | 0           | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-11-27 | 12:42    | 0.0              |
|    | 1.92        | Överskridet gränsvärde          | 2025-10-30 | 18:42    | 0.0              |
|    | 0.63        | Överskridet gränsvärde          | 2025-10-24 | 18:09    | 0.0              |
|    | 0           | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-10-07 | 10:37    | 0.0              |
|    | 0.62        | Överskridet gränsvärde          | 2025-10-03 | 13:53    | 0.0              |
|    | 2.69        | Överskridet gränsvärde          | 2025-10-03 | 13:40    | 0.0              |
|    | 0           | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-10-03 | 13:39    | 0.0              |
|    |             | Missat utandningstest           | 2025-09-30 | 23:01    | 0.0              |
|    | 0           | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-09-29 | 22:12    | 0.0              |
|    | 0           | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-09-29 | 22:04    | 0.0              |
|   | 3.39        | Överskridet gränsvärde          | 2025-09-29 | 21:18    | 0.0              |
|  | 0           | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-09-29 | 21:16    | 0.0              |
|  | 4.95        | Överskridet gränsvärde          | 2025-09-29 | 21:02    | 0.0              |
|  | 0           | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-09-29 | 21:00    | 0.0              |
|  | 0           | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-09-23 | 15:08    | 0.0              |
|  |             | Missat utandningstest           | 2025-09-05 | 17:01    | 0.0              |
|  | 0           | Utandningstest inom gränsvärdet | 2025-09-04 | 16:09    | 0.0              |